

## 三大功能

### 照護

符合腎友需求的設計  
洗腎後止血照護

### 提醒

15,30,45分燈號顯示  
止血計時提醒

### 聽音

長按兩秒一鍵使用  
瘻管聽音照護

# 腎友健康 放心交給 脈安扣



聯絡我們

(02)2228-9050

tmicontact01@gmail.com

235新北市中和區板南路661號16樓



台灣醫智股份有限公司  
Taiwan Medical Intelligent Ltd.



# 脈安扣 瘻管照護帶

你的健康，我們關心

## ▶ 產品特色

業界首創止血帶結合內建收音裝置+AI音頻分析演算法，「早期檢測透析血管失去功能的智慧裝置」及時警示。

## ▶ 瘻管照護

洗腎後的止血是照護瘻管的好時機，若止血時壓迫過久，將會影響瘻管健康。

有了「脈安扣」智能照護帶，就能在止血時計時，並協助檢測瘻管的暢通性。



## 洗腎照護

洗腎結束止血照護



### 操作說明：

- 1.長按兩秒開啟設備並計時
- 2.長按兩秒關機或60分自動關機

- ▶ 計時提醒: 以15、30、45分燈號顯示時間，時間到達伴隨鳴鈴提醒
- ▶ 瘻管聽音: 燈號示警，橘燈為聽音判斷中，綠燈為正常，紅燈為警示

## 居家照護

居家瘻管聽音照護



### 操作說明：

- 1.長按兩秒開啟設備並檢測
- 2.檢測結束後，長按兩秒關機

- ▶ 瘻管聽音: 燈號示警，橘燈為聽音判斷中，綠燈為正常，紅燈為警示
- ▶ 加值服務: 手機掃QRcode了解更多瘻管照護知識，歡迎腎友及家屬聯繫